

ÚČINNÁ
A BEZPEČNÁ
ANTIKONCEPCE
BEZ HORMONŮ



NITRODELOŽNÍ KULIČKA
IUB™ SCu300B MIDI
S MĚDĚNÝMI PERLAMI

axonia
PHARMA

www.nitrodeloznikulicka.cz

DLOUHODOBÁ
ANTIKONCEPČNÍ
ÚČINNOST: 5 LET

Váš lékař Vám doporučil nitroděložní kuličku **IUB™ (Intra Uterine Ball) SCu300B MIDI** - nehormonální nitroděložní tělísko kulovitěho tvaru s měděnými perlami. V této brožurce naleznete odpovědi na často kladené otázky.

Nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI**

- přináší vyšší účinnost ve srovnání s perorální antikoncepcí
- neobsahuje žádné hormony
- zabraňuje těhotenství pouze lokálně - v děloze účinkuje až po dobu 5 let
- neovlivňuje sexuální touhu (libido) ani metabolismus kostí
- neovlivňuje ovulaci
- nezpůsobuje zvýšení hmotnosti
- je alternativou k trvalé sterilizaci (můžete se tak vyhnout operaci)

Nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** je také vhodná a účinná metoda antikoncepce pro mladé dívky, které ještě nebyly těhotné. Po vyjmutí tělíska se plodnost ihned obnoví.

Pamatujte však, že žádná metoda antikoncepce není 100% účinná.



POKROKOVÁ NEHORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE NA 5 LET


Nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** účinkuje stejným způsobem jako jiná nitroděložní tělíska. Antikoncepční účinek zajišťuje měď z perel.

Nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** je jako jediná na světě vyrobena ze speciální slitiny (Nitinol) s tvarovou pamětí, která se v lékařství používá již po dlouhou dobu například k výrobě koronárních stentů a implantátů. Na tuto polymerem potaženou slitinu je umístěno několik měděných perel.

Díky své malé velikosti (asi 1/3 běžných nitroděložních tělísek tvaru T) se může nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** zavádět téměř bezbolestně i bez lokálního umrtvení.



Jakmile lékař umístí lineárním zavaděčem tělísko do dělohy, nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** opět získá svůj původní trojrozměrný tvar. Pružný kulatý tvar bez ostrých zakončení umožňuje nitroděložní kuličce **IUB™ SCu300B MIDI** neustále v děloze zaujímat ideální pozici. Tento pokrokový design nitroděložní kuličky **IUB™ SCu300B MIDI** tak **předchází podráždění či poškození dělohy**, ve které se nachází až po dobu 5 let.

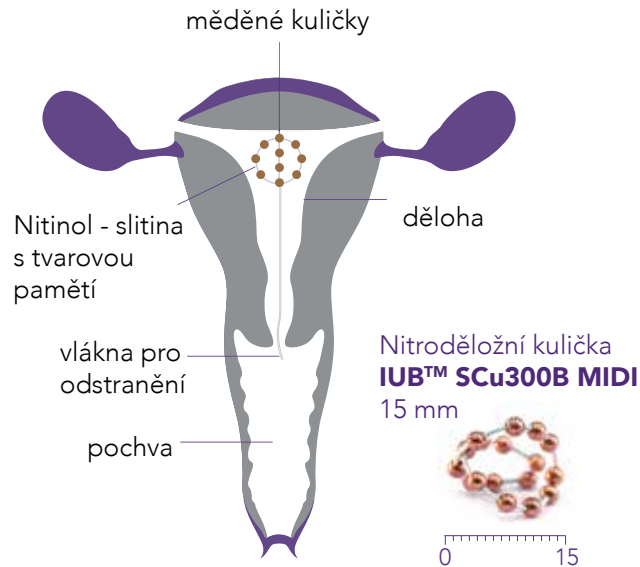

Nitroděložní kulička
IUB™ SCu300B MIDI
15 mm

obrázek ve skutečné velikosti



JAK NITRODĚLOŽNÍ KULIČKA IUB™ SCu300B MIDI FUNGUJE?

Jakmile je nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** umístěna do děložní dutiny, začnou měděné perly kontinuálně uvolňovat velmi malé množství mědi. Uvolňované množství je mnohonásobně menší, než se do organismu dostává běžnou stravou.

Měděné ionty, stejně jako u standardních nitroděložních tělísek, snižují mobilitu spermií a tak jim brání vajíčko oplodnit.

KDY A KAM SE NITRODĚLOŽNÍ KULIČKA IUB™ SCu300B MIDI ZAVÁDÍ?

Nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** se zavádí do dělohy během návštěvy Vašeho gynekologa. Ideální čas jsou poslední dny Vaší menstruace, kdy je děložní čípek přirozeně otevřen natolik, že umožňuje snadné zavedení tělíska a zároveň možnost těhotenství je minimální.

Lékař Vás nejdříve vyšetří, aby zjistil pozici Vaší dělohy. Po změření její velikosti Vám pomocí zavaděče nitroděložní kuličku **IUB™ SCu300B MIDI** umístí do děložní dutiny. Pokud jste ještě nebyla těhotná, může být nutné cervikální kanál nejdříve o něco málo rozšířit.

Po vyjmutí zavaděče zůstane nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** v děloze, kde si sama nalezne ideální pozici a okamžitě začne účinkovat. Správnost umístění tělíska v děloze je možné zkontrolovat ultrazvukem.

Po 4-12 týdnech po zavedení by měl Váš gynekolog pozici nitroděložní kuličky **IUB™ SCu300B MIDI** zkontrolovat a následně také v ročních intervalech.

Dvě vlákna určená pro vyndání tělíska vyčnívají do pochvy a při správném zavedení je Váš partner při pohlavním styku necítí. V případě, že by přesto působili potíže, Váš gynekolog Vám je může zkrátit.

MOHOU SE VYSKYTNOUT NĚJAKÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří silnější, delší menstruace a špinění. Po 2-3 měsících, jakmile si Vaše děloha na působení mědi zvykne, se intenzita většiny těchto nežádoucích účinků sníží. Některé ženy mohou při zavádění tělíska omdlít. Je to podobná reakce, jaká se vyskytuje při odběru krve a nemá žádné vážné následky.

Ve vzácných případech tělíska může proniknout děložní stěnou, a to zejména při zavádění. Toto se nazývá perforace. Pokud tělíska perforuje dělohu, je nutný jeho odstranění. Může být nutný chirurgický zákrok. Pokud kojíte nebo jste během 36 týdnů před zavedením porodila, je riziko perforace vyšší.

Tělíska může částečně nebo úplně opustit dělohu. Toto se nazývá vypuzení. U žen, které nikdy nebyly těhotné, je riziko vypuzení vyšší než u žen, které již těhotné byly. Jestliže se domníváte, že tělíska částečně nebo úplně opustilo dělohu, používejte další antikoncepční metodu, například kondom, a obraťte se na svého lékaře.

Před zavedením si důkladně přečtěte příbalový leták a případné otázky ohledně nežádoucích účinků konzultujte se svým gynekologem.

KDY BYSTE NEMĚLA POUŽÍVAT NITRODĚLOŽNÍ KULIČKU?

Nitroděložní kuličku byste neměla používat, pokud:

- můžete být těhotná,
- máte dělohu abnormálního tvaru,
- máte pánevní infekci, která se nazývá zánětlivé onemocnění pánve (ZOP), nebo se v současné době chováte tak, že vám hrozí vyšší riziko zánětlivého onemocnění pánve (například proto, že vy nebo váš partner máte pohlavní styk s více partnery/partnerkami),
- v uplynulých 3 měsících jste měla děložní infekci po těhotenství nebo potratu,
- máte rakovinu dělohy nebo děložního čípku,
- máte nevysvětlené krvácení z pochvy,
- máte infekci děložního čípku,
- máte Wilsonovu chorobu (poruchu zpracování mědi tělem),
- jste alergická na kterýkoli z materiálů tělíska,
- již máte v děloze nitroděložní antikoncepci.

Před zavedením si důkladně přečtěte příbalový leták a případné otázky konzultujte se svým gynekologem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE



5 dní po zavedení tělíska doporučujeme nemít pohlavní styk anebo používat vaginální tampony nebo menstruační kalíšky

Navštivte svého gynekologa, pokud:

- se domníváte, že jste těhotná
- trpíte pánevní bolestí nebo Vy či Váš partner pociťuje bolest při pohlavním styku
- máte neobvyklý poševní výtok nebo léze na genitáliích
- máte horečku nevysvětleného původu
- můžete být vystavena pohlavně přenosným chorobám
- cítíte jakoukoli jinou část tělíska kromě vláken, anebo jsou vlákna delší
- Vy nebo Váš partner se nakazíte virem HIV
- máte silné nebo prodloužené poševní krvácení
- vynechá Vám menstruace

Nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** nechrání proti pohlavně přenosným chorobám.

Po 5 letech by se měla nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** vyjmout. Může být zároveň vyměněna za novou.

Nitroděložní kulička **IUB™ SCu300B MIDI** je zdravotnický prostředek.



Otisk razítka lékaře, který Vám nitroděložní kuličku
IUB™ SCu300B MIDI může zavést:

axonia
PHARMA

Výhradní distributor: AXONIA, a.s.,
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, www.axonia.cz

www.nitrodelloznikulicka.cz