



IUB™

Ballerine®

Nehormonální nitroděložní kulička

VYTVAROVANÁ PRO ŽENY

NEHORMONÁLNÍ, DLOUHODOBÁ, ÚČINNÁ
A BEZPEČNÁ ANTIKONCEPCE

www.nitrodellozniculikicka.cz

VYTVAROVANÁ PRO ŽENY

- bez hormonů
- kulatá, malá, pružná
- šetrná k mému tělu
- snadné zavedení
- 5 let na ní nemusím myslet

*„Vždy jsem toužila po šetrné
a účinné antikoncepci bez hormonů.
Objevila jsem nitroděložní kuličku
IUB™ Ballerine® a jsem s ní velmi
spokojená.“*

Váš lékař Vám doporučil nitroděložní kuličku **IUB™ Ballerine®** - nehormonální nitroděložní tělíčko kulovitého tvaru s měděnými perlami. V této brožurce naleznete odpovědi na často kladené otázky.

Nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®**

- neobsahuje žádné hormony
- zabraňuje těhotenství pouze lokálně
- účinkuje až po dobu 5 let
- neovlivňuje sexuální touhu (libido) ani metabolismus kostí
- neovlivňuje ovulaci
- nezpůsobuje zvýšení hmotnosti
- přináší vysokou účinnost
- je alternativou k trvalé sterilizaci (můžete se tak vyhnout operaci)

Nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** je také vhodná a účinná metoda antikoncepce pro dívky, které ještě nebyly těhotné. Po vyjmutí tělíška se plodnost ihned obnoví.

Pamatujte však, že žádná metoda antikoncepce není 100% účinná.



CO JE NEHORMONÁLNÍ NITRODĚLOŽNÍ KULIČKA IUB™ BALLERINE®?

Pokroková, nehormonální, účinná a bezpečná antikoncepce na 5 let.

Nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** účinkuje lokálně stejným způsobem jako jiná nitroděložní tělíska. Antikoncepční účinek zajišťuje měď z perel.


Děloze přátelská a pružná nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** je jako jediná na světě vyrobena ze speciální slitiny (Nitinol) s tvarovou pamětí, která se v lékařství používá již po dlouhou dobu například k výrobě koronárních stentů a implantátů. Na tuto polymerem potaženou slitinu je umístěno několik měděných perel.

Díky své malé velikosti lze nitroděložní kuličku **IUB™ Ballerine®** zavádět velmi snadno i bez lokálního umrtvení.



ANTIKONCEPCE VYTVAROVANÁ PRO ŽENY

Jakmile lékař umístí tělíska do dělohy, nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** získá svůj původní trojrozměrný tvar. Pružná konstrukce bez ostrých zakončení umožňuje nitroděložní kuličce **IUB™ Ballerine®** neustále v děloze zaujímat ideální pozici. Tento pokrokový design nitroděložní kuličky **IUB™ Ballerine®** tak předchází podráždění či poškození dělohy, ve které zůstane až po dobu 5 let.

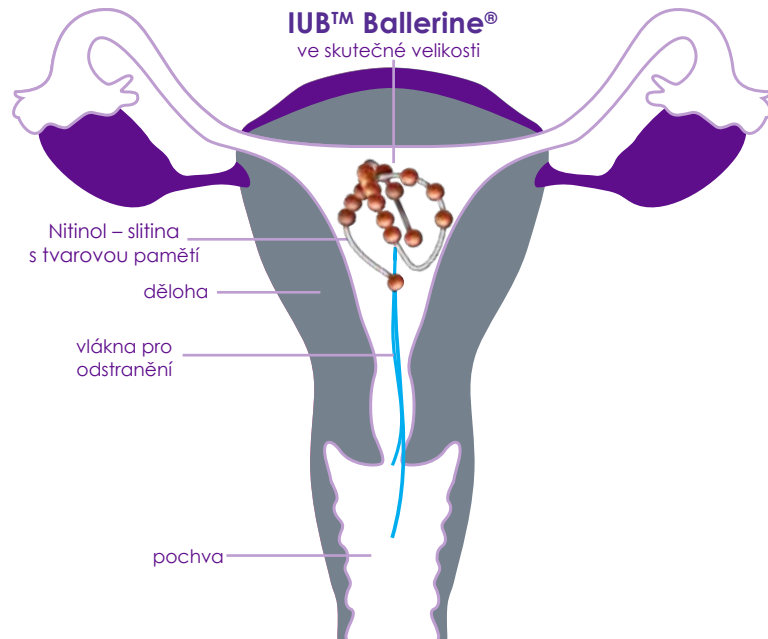

JAK NITRODĚLOŽNÍ KULIČKA IUB™ BALLERINE® FUNGUJE?

Jakmile je nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** umístěna do děložní dutiny, začnou měděné perly uvolňovat malé množství mědi, které je mnohonásobně menší, než se do organismu dostává běžnou stravou.

Měděné ionty, stejně jako u jiných nehormonálních nitroděložních tělísek, snižují mobilitu spermií a tak jim brání vajíčko oplodnit.



JAKÁ JE SPOLEHLIVOST IUB™ BALLERINE®?

Účinnost **IUB™ Ballerine®** v prevenci těhotenství je přes 99%.*

KDY A KAM SE NITRODĚLOŽNÍ KULIČKA IUB™ BALLERINE® ZAVÁDÍ?

Nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** se zavádí do dělohy během návštěvy Vašeho gynekologa. Ideální čas jsou poslední dny Vaší menstruace, kdy je děložní čípek přirozeně otevřen natolik, že umožňuje snadné zavedení tělíska a zároveň možnost těhotenství je minimální.

Lékař Vás nejdříve vyšetří, aby zjistil pozici Vaší dělohy. Po změření její velikosti Vám pomocí zavaděče nitroděložní kuličku **IUB™ Ballerine®** umístí do děložní dutiny. Pokud jste ještě nebyla těhotná, může být nutné cervikální kanál nejdříve o něco málo rozšířit.

Po vyjmutí zavaděče zůstane nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** v děloze, kde si sama nalezne ideální pozici a okamžitě začne účinkovat. Správnost umístění tělíska v děloze je možné zkontrolovat ultrazvukem.

Po 4–12 týdnech po zavedení by měl Váš gynekolog pozici nitroděložní kuličky **IUB™ Ballerine®** zkontrolovat a následně také v ročních intervalech.

Dvě vlákna určená pro vyjmutí tělíska vyčnívají do pochvy a při správném zavedení je Váš partner při pohlavním styku necítí. V případě, že by přesto působily potíže, Váš gynekolog Vám je může zkrátit.

*na základě zveřejněných vigilančních dat pro IUB™ Ballerine® společností OCON Medical Ltd.

JE ZAVEDENÍ BOLESTIVÉ?

Zavedení **IUB™ Ballerine®** může být bolestivé, zejména pokud je děložní hrdlo velmi těsné. Můžete požádat vašeho lékaře, aby použil lokální anestetikum nebo můžete užít léky snižující bolest.

Ihned po zavedení se mohou objevit křeče nebo menstruační krvácení. Některé ženy mohou cítit slabost, nevolnost nebo závratě několik minut poté. Nemusíte mít obavy – děloha potřebuje čas přizpůsobit se nové situaci. Každá bolest obvykle ustupuje rychle. Pokud bolest přetrvává, obraťte se na svého lékaře.



MOHOU SE VYSKYTNOUT NĚJAKÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří silnější, delší menstruace a špinění. Po 2–3 měsících, jakmile si Vaše děloha na působení **IUB™ Ballerine®** zvykne, se intenzita většiny těchto nežádoucích účinků sníží. Některé ženy mohou při zavádění tělíska omdlít. Je to podobná reakce, jaká se vyskytuje při odběru krve a nemá žádné vážné následky.

Ve vzácných případech tělíska může proniknout děložní stěnou, a to zejména při zavádění. Toto se nazývá perforace. Pokud tělíska perforuje dělohu, je nutné jeho odstranění a pak nejste chráněna před otěhotněním. Může být nutný chirurgický zákrok. Pokud kojíte nebo jste během 36 týdnů před zavedením porodila, je riziko perforace vyšší.

Tělíska může částečně nebo úplně opustit dělohu. Toto se nazývá vypuzení. U žen, které nikdy nebyly těhotné, je riziko vypuzení vyšší než u žen, které již těhotné byly. Jestliže se domníváte, že tělíska částečně nebo úplně opustilo dělohu, používejte další antikoncepční metodu, například kondom, a obraťte se na svého lékaře.

Před zavedením si důkladně přečtěte příbalový leták a případné otázky ohledně nežádoucích účinků konzultujte se svým gynekologem.



KDY BYSTE NEMĚLA POUŽÍVAT NITRODĚLOŽNÍ KULIČKU IUB™ BALLERINE®?

Nitroděložní kuličku byste neměla používat, pokud:

- můžete být těhotná,
- máte dělohu abnormálního tvaru,
- máte pánevní infekci, která se nazývá zánětlivé onemocnění pánve (ZOP), nebo se v současné době chováte tak, že vám hrozí vyšší riziko zánětlivého onemocnění pánve (například proto, že vy nebo váš partner máte pohlavní styk s více partnery/partnerkami),
- v uplynulých 3 měsících jste měla děložní infekci po těhotenství nebo potratu,
- máte rakovinu dělohy nebo děložního čípku,
- máte nevysvětlené krvácení z pochvy,
- máte infekci děložního čípku,
- máte Wilsonovu chorobu (poruchu zpracování mědi tělem),
- jste alergická na kterýkoli z materiálů tělíska (měď, nikl, titan, PET a PP),
- již máte v děloze nitroděložní antikoncepci.

Před zavedením si důkladně přečtěte příbalový leták a případné otázky konzultujte se svým gynekologem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Navštivte svého gynekologa, pokud:

- se domníváte, že jste těhotná
- trpíte pánevní bolestí nebo Vy či Váš partner pocítuje bolest při pohlavním styku
- máte neobvyklý poševní výtok nebo léze na genitáliích
- máte horečku nevysvětleného původu
- můžete být vystavena pohlavně přenosným chorobám
- cítíte jakoukoli jinou část tělíska kromě vláken, anebo jsou vlákna delší
- Vy nebo Váš partner se nakazíte virem HIV
- máte silné nebo prodloužené poševní krvácení
- vynechá Vám menstruace

Nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** nechrání před infekcí HIV, ani dalším pohlavně přenosným chorobám.

Žádná antikoncepční metoda, včetně nitroděložní kuličky **IUB™ Ballerine®**, nezabraňuje otěhotnění ve 100%.

Po 5 letech by se měla nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** vyjmout. Může být zároveň vyměněna za novou.

Nitroděložní kulička **IUB™ Ballerine®** je zdravotnický prostředek.





Otisk razítka lékaře, který Vám nitroděložní kuličku
IUB™ Ballerine® může zavést:

www.nitrodelloznilucka.cz

axonia
PHARMA

Výhradní distributor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185,
190 14 Praha 9, Česká republika, www.axonia.cz